

SUTUVET
MALLA QUIRÚRGICA DE REFUERZO PARA HERNIAS O EVENTRACIONES
ESTÉRIL
USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN

Es una malla de refuerzo de polipropileno, no absorbible, incolora, afirmada por enlace térmico sin derivados de origen animal o humano.

- Material biocompatible a largo plazo, características físicas y mecánicas que permanecen idénticas durante la implantación.
- No se encoge.

INDICACIONES

Se recomienda para los procesos herniarios de pared abdominal, eventraciones, genito-uritarios, por vía laparoscópica o cirugía abierta, sin contacto visceral.

INSTRUCCIONES DE USO

- Leer la descripción de material.
- Seleccionar el tamaño adecuado del producto, en proporción al tamaño del defecto y recortarlo para que ancle perfectamente en el mismo.
- Se recomienda fijar preferentemente con suturas de polipropileno u otro material de suturas no absorbibles o sutura mecánica.

CONTRAINDICACIONES

No debe utilizarse en animales en crecimiento, animales con enfermedades infecciosas o alérgicos a los polímeros.

PRECAUCIONES

- Manipular e implantar por cirujanos familiarizados con las técnicas quirúrgicas, así como con las aplicaciones específicas de las mallas.
- Verificar la integridad del empaque antes del uso para garantizar su esterilidad.
- No utilizar si el empaque se encuentra dañado o abierto.
- No debe utilizarse después de la fecha de caducidad indicada en el empaque.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

- Producto esterilizado por óxido de etileno (ETO)
- No reesterilizar.

PRESENTACIÓN

- Producto disponible en sobres individuales en dimensiones variables.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Transportar y almacenar a temperaturas no mayores a 25°C y un máximo de 60% de humedad, proteger de la luz solar y de fuentes de calor.
- No apilar más de 10 unidades verticalmente.

