

	FICHA TÉCNICA DE DISPOSITIVO MÉDICO:	Código:	FT-DTE-SU-01
	SONDA URINARIA DE USO VETERINARIO		
RESPONSABLE	DIRECCIÓN TECNICA	Vigencia desde:	19/05/2025

1. NOMBRE COMÚN:	Sonda urinaria para perros y gatos
2. DESCRIPCIÓN GENERAL:	<p><u>Sonda Urinaria:</u> Dispositivo médico flexible diseñado para el cateterismo urinario en perros y gatos. Fabricado con un material suave y biocompatible, para minimizar las molestias durante la inserción. La estructura flexible del catéter permite un uso más cómodo y menos invasivo, especialmente para animales sensibles o con anatomías difíciles. Las sondas están disponibles en diferentes diámetros para adaptarse a diferentes razas y tamaños de perros y gatos. También tiene una punta redondeada que minimiza el trauma en la uretra durante la inserción y aperturas laterales que previenen obstrucciones. Las sondas urinarias se utilizan a menudo para el alivio urinario a corto plazo o para recoger muestras de orina.</p> <p><u>Especificación para gatos:</u> Las sondas para gatos cuentan con un estilete, que es un alambre rígido que se utiliza para proporcionar rigidez durante la inserción. Además, con el anillo de sutura, para que el paciente pueda moverse libremente sin dolor ni molestias. También ofrece una inserción controlada, con su estilete de alambre guía, la sonda se puede introducir de manera fácil, suave y con una molestia mínima para su paciente.</p>



Sonda urinaria para perros.



Sonda urinaria para gatos.

Imágenes referenciales

3. DESCRIPCION DE PRODUCTOS:

GATO	Sonda Urinaria para gatos con estilete 4Fr (1.3mm) x 130mm con apertura lateral
	Sonda Urinaria para gatos con estilete 3Fr (1.0mm) x 130mm con apertura lateral
PERRO	Sonda Urinaria para perros sin estilete 6Fr (2.0mm) x 500mm con apertura lateral
	Sonda Urinaria para perros sin estilete 8Fr (2.6mm) x 500mm con apertura lateral

4. MATERIALES:

Componentes: sonda, anillo, cubo de estilete son de material PP (polipropileno) y el estilete es de acero inoxidable.

No está fabricado con látex de caucho natural ni plastificante DEHP.

Cualquier sustancia de origen animal, por ejemplo, EEB/EET, no se utiliza durante la fabricación.

5. USO PREVISTO:

Diagnóstico y tratamiento de problemas subyacentes que involucran el sistema del tracto urinario del perro y el gato y ayudar a que la orina se mueva si hay una obstrucción en el área de la vejiga.

6. MÉTODO DE ESTERILIZACION

Esterilizado con óxido de etileno

7. VIGENCIA

5 años a partir de la fecha de fabricación.

8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacene entre 5 °C y 35 °C, evite el calor excesivo, protéjalo de la luz solar directa y la humedad.

9. PRESENTACIONES

Sonda Urinaria para gatos:	Disponible en cajas por 10 unidades Tamaño de caja: Largo (253mm) x Ancho (3mm) x Alto (21mm)
Sonda Urinaria para perros:	Disponible en cajas por 50 unidades Tamaño de caja: Largo (600mm) x Ancho (140mm) x Alto (60mm)

10. FABRICANTE: Acondicionado por TAGUMEDICA - Perú